

CZ Návod na použití

GeloSitin

Péče o nos



Vážení pacienti, přečtěte si prosím pečlivě tento návod na použití, obsahuje důležité informace, které byste měli vzít v úvahu při používání zdravotnického prostředku. Pokud máte další dotazy, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Složení:

GeloSitin Péče o nos obsahuje (60 %): rafinovaný sezamový olej

Další složky: dicaprylyl karbonát, pomerančový olej, citronový olej, mix antioxidantů (přírodní extrakty s vysokým obsahem tokoferolu/vitamin E, kyselina palmitoyl askorbová, kyselina askorbová, kyselina citronová, ethanol, rostlinný olej). Neobsahuje konzervanty.

Obsah: 15 ml nosní olej

Indikace:

GeloSitin Péče o nos se používá pro fyzikální léčbu a zvlhčení suché nebo poškozené nosní sliznice, např. při působení suchého vzduchu (klimatizace, topení), při nadměrném používání dekonescenčních sprejů nebo v případě suché rýmy s nebo bez krust/zaschlého hlenu a strupů v nosní dutině nebo na vnitřním povrchu nosních stěn.

Kontraindikace, interakce a vedlejší účinky:

GeloSitin Péče o nos nepoužívejte v případě známé přecitlivělosti na kteroukoliv složku přípravku. Nepoužívejte současně s jinými lokálními terapeutickými látkami. Pokud jsou do nosu aplikovány současně vedle přípravku GeloSitin Péče o nos další zdravotnické prostředky nebo jiné terapeutické přístroje, jako nosní kanyla při kyslíkové terapii, je potřeba kontrolovat jejich kompatibilitu. Ve velmi ojedinělých případech se může v oblasti nosu a krku vyskytnout pocit škrábání nebo pálení.

Poznámka:

Jakékoliv závažné vedlejší účinky hlaste výrobci a příslušnému odpovědnému orgánu.

Co je nutné zohlednit při léčbě dětí?

Nevhodné pro děti do 3 let.

Co je třeba dodržovat během těhotenství a kojení?
GeloSitin Péče o nos může být bez obav používán během těhotenství a kojení.

Dávkování, způsoby a délka aplikace:

Dodržujte uvedené pokyny k použití, pokud váš lékař neurčí jinak.

Jak používat GeloSitin Péče o nos?

Před prvním použitím našroubujte přiložený dávkovač na skleněnou lahvičku. Nejprve odstraňte šroubovací uzávěr z lahvičky, vložte dávkovač s trubičkou do lahvičky a pevně ho našroubujte (Obrázek 1).

Odstraňte zelený ochranný kryt a držte lahvičku vždy ve svislé poloze, jinak nebude dávkovač fungovat správně (Obrázek 2). Důležité: před prvním použitím a po delší době nepoužívání několikrát intenzivně stlačte dávkovač, dokud se neobjeví první dávka/vstřík, vyhněte se očím (Obrázek 3).

Jaké množství a jak často GeloSitin Péče o nos použít?

Podle potřeby aplikujte/vstříknete 1–2 dávky přípravku několikrát denně do každé nosní díry (Obrázek 4).

Jak dlouho můžete GeloSitin Péče o nos používat?

GeloSitin Péče o nos lze používat dlouhodobě nebo pro intervalovou/nárazovou léčbu.

Pokyny a informace o době použitelnosti:

GeloSitin Péče o nos nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. GeloSitin Péče o nos by měl být zcela spotřebován během 6 až 7 týdnů po prvním otevření lahvičky.

Skladování:


GeloSitin Péče o nos uchovávejte při teplotě do 25 °C. GeloSitin Péče o nos neuchovávejte v chladničce.

Zdravotnický prostředek, pečlivě skladujte!

Uchovávejte mimo dosah dětí!

Pokyny k likvidaci/recyklaci:

Zbýtky roztoku zlikvidujte spolu s lahvičkou v domovním odpadu. Prázdnou skleněnou lahvičku, papírový obal a plastové části zlikvidujte v rámci tříděného odpadu.

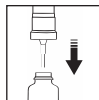

Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3



Obrázek 4



G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Strasse 11, 25551 Hohenlockstedt, Německo

Distributor:

Medindex, spol. s r.o., Olšátná 607/1, Praha 8
Česká republika

Infolinka: (+420) 775 772 877

Poslední datum revize: 2025-08



Číslo šarže



Přečtěte si pečlivě
návod na použití



Zdravotnický prostředek



Jedinečný číselný kód
zdravotnického
prostředku



Výrobce



Datum expirace



0482

POHL BOSKAMP

11421/4

SK Návod na použitie

GeloSitin

Starostlivosť o nos



Vážení pacienti, pozorne si prosím prečítajte tento návod na použitie, pretože obsahuje dôležité informácie, ktoré by ste mali mať na zreteli pri používaní tejto zdravotníckej pomôcky. S ďalšími otázkami sa prosím obráťte na svojho lekára alebo lekárnik.

Zloženie:

GeloSitin Starostlivosť o nos obsahuje (60 %): rafinovaný sezamový olej
Iné zložky: dicapryllyl karbonát, pomarančový olej, citrónový olej, zmes antioxidantov (prírodné extrakty s vysokým obsahom tokoferolu/vitamin E, kyselina palmitoyl askorbová, kyselina askorbová, kyselina citrónová, etanol, rastlinný olej). Bez konzervačných látok.

Obsah: 15 ml nosový olej

Indikácie:

GeloSitin Starostlivosť o nos sa používa na fyzikálnu liečbu a zvlhčenie suchej alebo poškodenej nosovej sliznice, napr. pri pôsobení suchého vzduchu (klimatizácie, kúrenia), pri nadmernom používaní dekongescenčných sprejov, alebo v prípade suchej nádchy a alebo bez zasnúteného hlienu a šušňov v nosovej dutine alebo na vnútornom povrchu nosových stien.

Kontraindikácie, interakcie a vedľajšie účinky:

Nepoužívajte GeloSitin Starostlivosť o nos v prípade známej precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku prípravku. Nepoužívajte súčasne s inými lokálnymi terapeutickými činidlami. Ak sú do nosa aplikované súčasne s prípravkom GeloSitin Starostlivosť o nos ďalšie zdravotnícke prostriedky alebo iné terapeutické prístroje, ako nosová kanyla určená na podávanie kyslíkovej terapie, je potrebné kontrolovať ich kompatibilitu. Vo veľmi ojedinelých prípadoch sa môže v oblasti nosa a hrdla vyskytnúť pocit svrbenia alebo pálenia.

Poznámka:

Akékoľvek závažné vedľajšie účinky nahláste priamo výrobcovi a príslušnému zodpovednému orgánu.

Na čo je treba dať pozor pri používaní u detí?

Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Čo je potrebné dodržiavať počas tehotenstva a dojčenia?

GeloSitin Starostlivosť o nos sa môže bez obáv používať počas tehotenstva a dojčenia.

Dávkovanie, spôsob a dĺžka aplikácie:

Dodržiujte uvedené pokyny na použitie, ak váš lekár neurčí inak.

Ako používať GeloSitin Starostlivosť o nos?

Pred prvým použitím priskrutkujte priložený dávkovač/pumpičku na sklenenú fľaštičku. Najprv odstráňte skrutkovací uzáver z fľaštičky, vložte dávkovač s trubičkou do fľaštičky a pevne ho priskrutkujte (Obrázok 1).

Odstráňte zelený ochranný kryt a vždy držte fľaštičku vo vertikálnej polohe, inak by dávkovač/pumpička nefungovala správne (Obrázok 2). Dôležité: pred prvým použitím a po dlhšej dobe nepoužívania niekoľkokrát intenzívne stlačte dávkovač, až kým sa neobjaví prvá dávka/výstrek, vyhnite sa očiam (Obrázok 3).

Aké množstvo a ako často používať GeloSitin Starostlivosť o nos?

Podľa potreby, niekoľkokrát denne aplikujte/vstreknite 1–2 dávky prípravku do každej nosovej diery (Obrázok 4).

Ako dlho sa môže GeloSitin Starostlivosť o nos používať?

GeloSitin Starostlivosť o nos sa môže používať dlhodobu alebo pri intervalovej/nárazovej liečbe.

Pokyny a informácie o dobe použiteľnosti:

GeloSitin Starostlivosť o nos nepoužívajte po uplynutí dátumu spotreby. GeloSitin Starostlivosť o nos by mal byť úplne spotrebovaný do 6 až 7 týždňov po prvom otvorení fľaštičky.

Skladovanie:


GeloSitin Starostlivosť o nos uchováajte pri teplote do 25 °C. GeloSitin Starostlivosť o nos neuchováajte v chladničke.

Zdravotnícku pomôcku starostlivo skladujte!

Uchováajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Pokyny na likvidáciu/recykláciu:

Zvyšky roztoku zlikvidujte spolu s liekovkou v domovom odpade. Prázdnu sklenenú fľaštičku, papierový obal a plastové časti zlikvidujte v rámci triedeného odpadu.

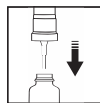

Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3



Obrázok 4



G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kierler Strasse 11, 25551 Hohenlockstedt, Nemecko

Distribútor:

Medindex, spol. s r.o.
Olštyňská 607/1, Praha 8, Česká republika
Infolinka: (+420) 775 772 877

Dátum poslednej revízie: 2025-08



Číslo šarže



Starostlivo si prečítajte návod na použitie



Zdravotnícka pomôcka



Jedinečný číselný kód zdravotníckej pomôcky



Výrobca



Dátum spotreby



0482

POHL BOSKAMP

11421/4